



BEDIENUNGSANLEITUNG **OHRSTÜCKE**

FÜR WIDEX HÖRSYSTEME



WIDEX

SOUND LIKE NO OTHER

OHRSTÜCKE FÜR HDO-HÖRSYSTEME

(Wird vom Hörgeräte-Akustiker ausgefüllt)

Ihr Ohrstücktyp:

STANDARD-OHRSTÜCKE FÜR RIC/RITE-HÖRSYSTEME



MASSOHRSTÜCKE UND OTOPLASTIKEN FÜR RIC/RITE-HÖRSYSTEME




STANDARD-OHRSTÜCKE FÜR HÖRSYSTEME MIT DÜNNSCHLAUCH 0.9 UND 1.4



MASSOHRSTÜCKE FÜR HÖRSYSTEME MIT DÜNNSCHLAUCH 0.9 UND 1.4



□ STANDARD- UND MASSOHRSTÜCKE FÜR HÖRSYSTEME MIT KLASSISCHEM DÜNNESCHLAUCH

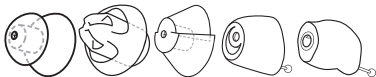

□ OTOPLASTIKEN FÜR HÖRSYSTEME MIT KLASSISCHEM SCHLAUCH



INHALT

EINFÜHRUNG ZU IHREN OHRSTÜCKEN.....	6
Willkommen.....	6
Einbauen des Hörers und des Dünnschlauchs in das Hörsystem.....	6
STANDARD-OHRSTÜCKE FÜR RIC/RITE-HÖRSYSTEME.....	8
Reinigungswerkzeuge.....	9
Pflege.....	9
Verwendung des Cerumenschutzes.....	10
Auswechseln des Ohrstücks.....	13
Verwendung des Ankerteils.....	14
INDIVIDUELLE OHRSTÜCKE UND OTOPLASTIKEN FÜR RIC- BZW. RITE- MODELLE.....	16
Reinigungswerkzeuge.....	17
Pflege.....	17
Verwendung des Cerumenschutzes.....	19
STANDARD-OHRSTÜCKE FÜR DÜNNSCHLAUCH 0.9 UND 1.4.....	22
Reinigungswerkzeuge.....	22
Pflege.....	23
Verwendung des Cerumenschutzes.....	24
Auswechseln des Ohrstücks.....	26
Wechsel des Dünnschlauchs.....	26

Verwendung des Ankerteils.....	29
MASS-OHRSTÜCKE FÜR DÜNNSCHLAUCH 0.9 UND 1.4.....	30
Reinigungswerkzeuge.....	31
Pflege.....	31
Verwendung des Cerumenschutzes.....	33
STANDARD- UND MASSOHRSTÜCKE FÜR KLASSISCHEN DÜNNSCHLAUCH	
.....	36
Reinigungswerkzeuge.....	36
Pflege.....	37
Auswechseln des Ohrstücks.....	38
Wechsel des Dünnschlauchs.....	40
Verwendung des Ankerteils.....	40
KLASSISCHE OTOPLASTIKEN.....	43
Reinigungswerkzeuge.....	43
Pflege.....	43
Schallschlauch wechseln.....	45
SYMBOLE.....	46

EINFÜHRUNG ZU IHREN OHRSTÜCKEN

Willkommen


Diese Anleitung zum Ohrstück gibt Ihnen eine Einführung in die Verwendung Ihrer Ohrstücke. Wir empfehlen, dass Sie das Kapitel über Ihr spezifisches Ohrstück aufmerksam lesen, um alles über das Reinigen und Wechseln von Teilen zu erfahren.

HINWEIS

Die Ohrstücke und konkrete Teile der Ohrstücke können anders als in dieser Anleitung gezeigt aussehen. Wir behalten uns das Recht vor, notwendige Änderungen vorzunehmen.

Einbauen des Hörers und des Dünnschlauchs in das Hörsystem

Für alle Ohrstücke gilt, dass der Hörer/Dünnschlauch korrekt in das Hörsystem eingebaut werden muss.

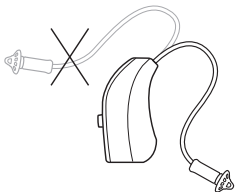

Korrektter Einbau

Die Krümmung des Hörers/Dünnschlauchs muss vom Hörsystem weg weisen.

Falscher Einbau

Die Krümmung des Hörers/Dünnschlauchs darf sich nicht über das Hörsystem wölben.


STANDARD-OHRSTÜCKE FÜR RIC/RITE-HÖRSYSTEME

Dieses Kapitel beschreibt die Handhabung und Reinigung verschiedener Standard-Ohrstücke für RIC/RITE-Modelle von Widex. Die Abbildung zeigt ein Hörsystem mit einem Schirmchen. Bei den anderen Standard-Ohrstücken ist die Vorgehensweise jedoch identisch.



Reinigungswerkzeuge

Sie erhalten die folgenden Pflegewerkzeuge zusammen mit Ihrem Hörsystem:

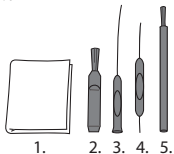

1. Tuch
2. Bürste
3. Langes Reinigungswerkzeug
4. Kurzes Reinigungswerkzeug
5. Magnetstab

Pflege



Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Ohrstück sauber und frei von Cerumen (Ohrenschmalz), Feuchtigkeit und sonstigen Verschmutzungen ist. Reinigen Sie die Hörerzuleitung nach jedem Tragen mit dem Tuch.



Sie können das Standard-Ohrstück in lauwarmem Wasser reinigen: **Ziehen Sie es dazu zunächst vom Hörer ab** und spülen Sie es gründlich ab. Lassen Sie es dann über Nacht trocknen.



Verwenden Sie keinerlei Flüssigkeiten oder Desinfektionsmittel zum Reinigen Ihres Ohrstücks.



Der Hörer (Lautsprecher) darf **niemals** mit Flüssigkeiten in Berührung kommen, da dies den Hörer beschädigen kann.


Hinweise zum Wechsel des Cerumenschutzes finden Sie im Abschnitt Cerumenschutz.

Verwendung des Cerumenschutzes


Der Cerumenschutz hilft, das Hörsystem vor Ohrenschmalz (Cerumen) zu schützen. Stellen Sie sicher, dass immer der Widex Cerumenschutz an Ihrem Hörsystem angebracht ist.

Überprüfen Sie regelmäßig auf folgende Weise, ob der Cerumenschutz durch Ohrenschmalz verstopft ist:

Ziehen Sie zunächst das Ohrstück von der Hörerzuleitung ab. Wenn sich im Cerumenschutz Ohrschmalz angesammelt hat, wechseln Sie den Cerumenschutz.

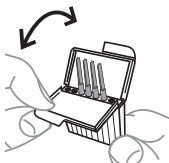


Öffnen Sie die Cerumenschutzpackung wie dargestellt.

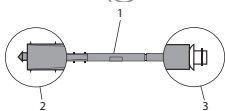


Das Cerumenschutz-Set besteht aus folgenden Teilen:


1. Haltestäbchen
2. Ziehhaken
3. Cerumenschutz

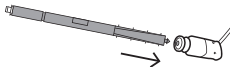

Stecken Sie den Ziehhaken des Haltestäbchens in den gebrauchten Cerumenschutz im Schallauslass ein.

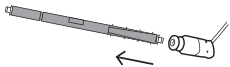

Ziehen Sie den gebrauchten Cerumenschutz gerade heraus.

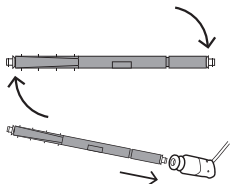

Drehen Sie das Haltestäbchen um.

Setzen Sie den neuen Cerumenschutz in den Schallauslass ein.
Ziehen Sie das Haltestäbchen gerade heraus. Der neue Cerumenschutz löst sich dabei automatisch vom Haltestäbchen.
Drücken Sie den Cerumenschutz mit leichtem Druck gegen eine Oberfläche, um sicherzustellen, dass er sicher sitzt.
Stecken Sie das Ohrstück wieder auf.





Der Cerumenschutz ist zur einmaligen Verwendung ausgelegt und wird nicht gereinigt.




Falls der Cerumenschutz nicht richtig sitzt, muss er entfernt und ein neuer eingesetzt werden.



Wenn der Cerumenschutz im Ohr herausfällt, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Hörgeräte-Akustiker, um ihn entfernen zu lassen. Versuchen Sie NICHT, den Cerumenschutz selbst zu entfernen.

Auswechseln des Ohrstücks

Das Ohrstück muss bei Bedarf gewechselt werden. Wenn Sie neue Ohrstücke benötigen oder das Ohrstück nicht länger richtig passt, wenden Sie sich an Ihren Hörgeräte-Akustiker.

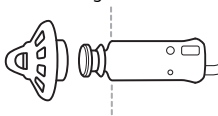

Stecken Sie das neue Ohrstück auf den Hörer auf, indem Sie es bis zu der hier angedeuteten gestrichelten Linie schieben.

Beim Hineindrücken des Hörers in das Ohrstück spüren Sie, wie der Hörer einrastet.

HINWEIS

Dabei ist es sehr wichtig, dass das Ohrstück sicher sitzt.




Versuchen Sie nicht, die Hörerzuleitung vom Hörsystem zu trennen.

Verwendung des Ankerteils

Bei einem Hörsystem mit Standard-Ohrstücken können Sie mit einem Ankerteil den komfortablen Sitz des Ohrstücks im Ohr sicherstellen.

Nachfolgend wird erläutert, wie Sie das entsprechende Ankerteil, das Sie erhalten haben, an Ihrem Ohrstück anbringen:

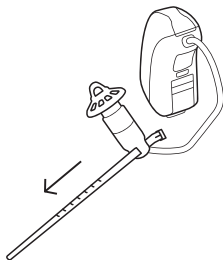


Ankerteil

Ziehen Sie das spitze Ende des Ankerteils durch die Öffnung seitlich am Schallschlauch.

Ziehen Sie das Ankerteil durch die Öffnung, bis der Widerhaken am Ende anschlägt.

Sie können Ihr Ohrstück nun benutzen.

Positionieren Sie es für komfortablen Sitz.

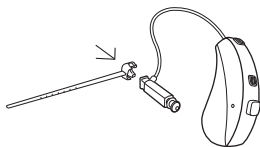

Ankerteil mit Verriegelung


Drücken Sie die Ankerteilverriegelung in Richtung des flachen Endes des Hörers, bis sie mit einem Klick einrastet.

Sie können Ihr Ohrstück nun benutzen.

Positionieren Sie es für komfortablen Sitz.

INDIVIDUELLE OHRSTÜCKE UND OTOPLASTIKEN FÜR RIC- BZW. RITE-MODELLE

Dieses Kapitel beschreibt die Handhabung und Reinigung verschiedener individueller Ohrstücke und Otoplastiken für RIC/RITE-Modelle. Sofern nicht anders angegeben, zeigen die Abbildungen ein Hörsystem mit einem Ohrstück.

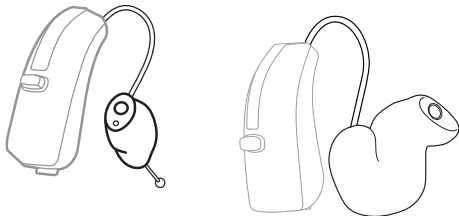


HINWEIS

Entfernen Sie das Maßbohrstück stets mit Hilfe des Ziehfadens aus dem Ohr.

Reinigungswerkzeuge

Sie erhalten die folgenden Pflegewerkzeuge zusammen mit Ihrem Hörsystem:

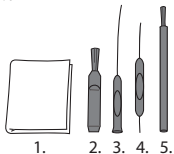

1. Tuch
2. Bürste
3. Langes Reinigungswerkzeug
4. Kurzes Reinigungswerkzeug
5. Magnetstab



Pflege



Überprüfen Sie regelmäßig, dass das Ohrstück sauber und frei von Cerumen (Ohrenschmalz), Feuchtigkeit und sonstigen Verschmutzungen ist. Reinigen Sie die Hörerzuleitung nach jedem Tragen mit dem Tuch.



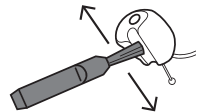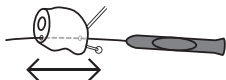

Entfernen Sie Cerumen, das sich um den Schallauslass herum angesammelt hat, mit der kleinen Bürste oder dem Tuch.
Ist der Schallauslass verstopft, wechseln Sie den Cerumenschutz.
Versuchen Sie **NICHT**, den Cerumenschutz zu reinigen.



Ihr Maßbohrstück bzw. Ihre Maß-Otoplastik kann mit einer Belüftung ausgestattet sein. Die Abbildungen links zeigen die Reinigung der verschiedenen Belüftungstypen.

 Das Ohrstück darf unter keinen Umständen mit Flüssigkeiten wie Wasser oder Reinigungslösungen in Berührung kommen.


 Versuchen Sie niemals, die Hörerzuleitung von Maßohrstück/Otoplastik bzw. vom Hörsystem zu trennen, weil dies die Hörerzuleitung beschädigen kann.


 Ziehen Sie beim Abnehmen des Hörsystems vom Ohr nicht an der Hörerzuleitung.

Verwendung des Cerumenschutzes


Der Cerumenschutz hilft, das Hörsystem vor Ohrenschmalz (Cerumen) zu schützen. Stellen Sie sicher, dass immer der Widex Cerumenschutz an Ihrem Hörsystem angebracht ist.

Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Cerumenschutz durch Ohrenschmalz verstopft ist.

 Maßohrstück und Maß-Otoplastik dürfen NICHT von der Hörerzuleitung getrennt werden.

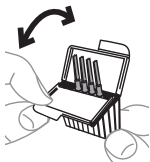


Öffnen Sie die Cerumenschutzpackung wie dargestellt.

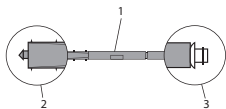


Das Cerumenschutz-Set besteht aus folgenden Teilen:


1. Haltestäbchen
2. Ziehhaken
3. Cerumenschutz

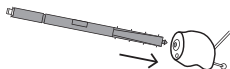


Stecken Sie den Ziehhaken des Haltestäbchens in den gebrauchten Cerumenschutz im Schallauslass ein.

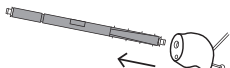

Ziehen Sie den gebrauchten Cerumenschutz gerade heraus.

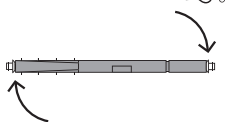

Drehen Sie das Haltestäbchen um.

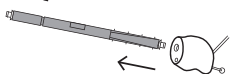

Setzen Sie den neuen Cerumenschutz in den Schallauslass ein.
Ziehen Sie das Haltestäbchen gerade heraus. Der neue Cerumenschutz löst sich dabei automatisch vom Haltestäbchen.
Drücken Sie den Cerumenschutz mit leichtem Druck gegen eine Oberfläche, um sicherzustellen, dass er sicher sitzt.



Der Cerumenschutz ist zur einmaligen Verwendung ausgelegt und wird nicht gereinigt.



Falls der Cerumenschutz nicht richtig sitzt, muss er entfernt und ein neuer eingesetzt werden.



Wenn der Cerumenschutz im Ohr herausfällt, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Hörgeräte-Akustiker, um ihn entfernen zu lassen. Versuchen Sie NICHT, den Cerumenschutz selbst zu entfernen.


STANDARD-OHRSTÜCKE FÜR DÜNNSCHLAUCH 0.9 UND 1.4

Dieses Kapitel beschreibt die Handhabung und Reinigung der Standard-Ohrstücke für Hörsysteme mit Dünnschlauch 0.9 und 1.4.



Reinigungswerkzeuge

Sie erhalten die folgenden Pflegewerkzeuge zusammen mit Ihrem Hörsystem:

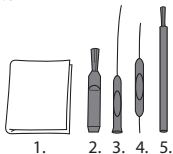


1. Tuch
2. Bürste
3. Langes Reinigungswerkzeug
4. Kurzes Reinigungswerkzeug
5. Magnetstab

Pflege



Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Ohrstück sauber und frei von Cerumen (Ohrenschmalz), Feuchtigkeit und sonstigen Verschmutzungen ist. Reinigen Sie die Hörerzuleitung nach jedem Tragen mit dem Tuch.

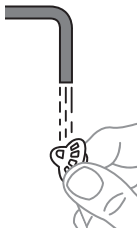

Zusätzlich können Sie das Standard-Ohrstück in lauwarmem Wasser reinigen: **Ziehen Sie es dazu zunächst vom Hörer ab** und spülen Sie es gründlich ab. Lassen Sie es dann über Nacht trocknen.



Verwenden Sie keinerlei Flüssigkeiten oder Desinfektionsmittel zum Reinigen Ihres Ohrstücks.


Hinweise zum Wechsel des Cerumenschutzes finden Sie im Abschnitt Cerumenschutz.

Verwendung des Cerumenschutzes

Der Cerumenschutz ist ein Filter, der dabei hilft, den Hörer vor Ohrenschmalz (Cerumen) zu schützen. Stellen Sie sicher, dass immer der Widex Cerumenschutz an Ihrem Hörsystem angebracht ist.

Überprüfen Sie regelmäßig auf folgende Weise, ob der Cerumenschutz durch Ohrenschmalz verstopft ist:


Ziehen Sie zunächst das Ohrstück vom Schlauch ab. Wenn sich im Cerumenschutz Ohrenschmalz angesammelt hat, wechseln Sie den Cerumenschutz. Versuchen Sie NICHT, den Cerumenschutz zu reinigen.

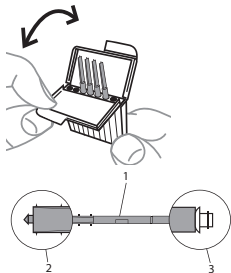


Öffnen Sie die Cerumenschutzpackung wie dargestellt.

Das Cerumenschutz-Set besteht aus folgenden Teilen:

1. Haltestäbchen
2. Ziehhaken
3. Cerumenschutz

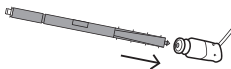

Stecken Sie den Ziehhooken des Haltestäbchens in den gebrauchten Cerumenschutz im Schallauslass ein.

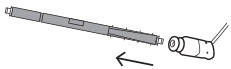


Ziehen Sie den gebrauchten Cerumenschutz gerade heraus.



Drehen Sie das Haltestäbchen um.



Setzen Sie den neuen Cerumenschutz in den Schallauslass ein.

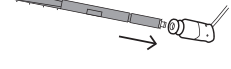

Ziehen Sie das Haltestäbchen gerade heraus. Der neue Cerumenschutz löst sich dabei automatisch vom Haltestäbchen. Drücken Sie den Cerumenschutz mit leichtem Druck gegen eine Oberfläche, um sicherzustellen, dass er sicher sitzt. Stecken Sie das Ohrstück wieder auf.





Der Cerumenschutz ist zur einmaligen Verwendung ausgelegt und wird nicht gereinigt.




Falls der Cerumenschutz nicht richtig sitzt, muss er entfernt und ein neuer eingesetzt werden.



Wenn der Cerumenschutz im Ohr herausfällt, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Hörgeräte-Akustiker, um ihn entfernen zu lassen. Versuchen Sie NICHT, den Cerumenschutz selbst zu entfernen.

Auswechseln des Ohrstücks

Das Ohrstück muss bei Bedarf gewechselt werden. Wenn Sie neue Ohrstücke benötigen oder das Ohrstück nicht länger richtig passt, wenden Sie sich an Ihren Hörgeräte-Akustiker.

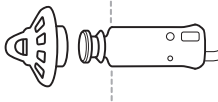

Stecken Sie das neue Ohrstück auf den Dünnschlauch auf, indem Sie es bis zu der hier angedeuteten gestrichelten Linie schieben.

Beim Hineindrücken des Schlauchendes in das Ohrstück spüren Sie, wie der Hörer einrastet.

HINWEIS

Dabei ist es sehr wichtig, dass das Ohrstück sicher sitzt.

Wechsel des Dünnschlauchs

Der Dünnschlauch muss bei Bedarf gewechselt werden. Wenn Sie neue Schläuche benötigen, wenden Sie sich an Ihren Hörgeräte-Akustiker.

Benutzen Sie das mit Ihrem Dünnschlauch gelieferte Spezialwerkzeug, um den Schlauch vom Hörsystem abzuziehen.


HINWEIS

Es gibt verschiedene Werkzeuge. Sie sollten die untenstehenden Anweisungen für das jeweilige Werkzeug, das Sie erhalten haben, befolgen.


Breites Werkzeug




1. Setzen Sie den Schlauch wie gezeigt in das Spezialwerkzeug.

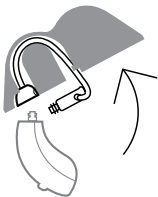

2. Heben Sie das Ohrstück wie gezeigt mit einer Schwenkbewegung vom Hörsystem ab.

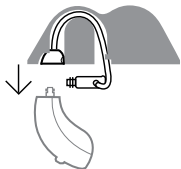

Schmales Werkzeug

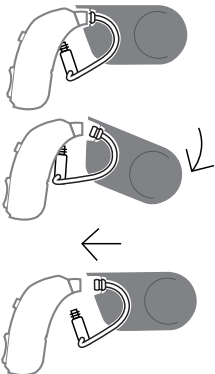

3. Setzen Sie dann den neuen Schlauch in das Werkzeug und klicken Sie ihn auf das Hörsystem.

1. Setzen Sie den Schlauch wie gezeigt in das Spezialwerkzeug.


2. Drücken Sie das Werkzeug in einem Winkel wie gezeigt nach unten.

3. Setzen Sie den neuen Schlauch in das Werkzeug und klicken Sie ihn auf das Hörsystem.

Verwendung des Ankerteils

Verwenden Sie das Ankerteil, um einen sicheren und angenehmen Sitz des Ohrstücks in Ihrem Ohr sicherzustellen.

Nachfolgend wird erläutert, wie Sie das entsprechende Ankerteil, das Sie erhalten haben, an Ihrem Ohrstück anbringen:

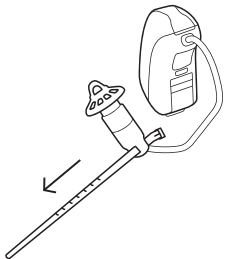


Ankerteil

Ziehen Sie das spitze Ende des Ankerteils durch die Öffnung seitlich am Schallschlauch.

Ziehen Sie das Ankerteil durch die Öffnung, bis der Widerhaken am Ende anschlägt.

Sie können Ihr Ohrstück nun benutzen.

Positionieren Sie es für komfortablen Sitz.

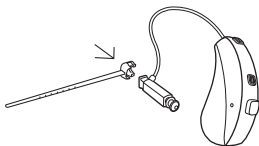

Ankerteil mit Verriegelung


Drücken Sie die Ankerteilverriegelung in Richtung des flachen Endes des Hörers, bis sie mit einem Klick einrastet.

Sie können Ihr Ohrstück nun benutzen.

Positionieren Sie es für komfortablen Sitz.

MASS-OHRSTÜCKE FÜR DÜNNSCHLAUCH 0.9 UND 1.4

Dieses Kapitel beschreibt die Handhabung und Reinigung der Maß-Ohrstücke für Hörsysteme mit Dünnschlauch 0.9 und 1.4.

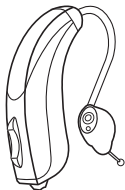


HINWEIS

Entfernen Sie das **Maßohrstück** stets mit Hilfe des Ziehfadens aus dem Ohr.

Reinigungswerkzeuge

Sie erhalten die folgenden Pflegewerkzeuge zusammen mit Ihrem Hörsystem:

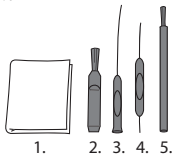

1. Tuch
2. Bürste
3. Langes Reinigungswerkzeug
4. Kurzes Reinigungswerkzeug
5. Magnetstab


Pflege



Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Ohrstück sauber und frei von Cerumen (Ohrenschmalz), Feuchtigkeit und sonstigen Verschmutzungen ist. Reinigen Sie die Hörerzuleitung nach jedem Tragen mit dem Tuch.



Entfernen Sie Cerumen, das sich um den Schallauslass herum angesammelt hat, mit der kleinen Bürste oder dem Tuch.
Ist der Schallauslass verstopft, wechseln Sie den Cerumenschutz.
Versuchen Sie NICHT, den Cerumenschutz zu reinigen.

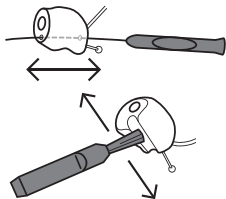

Ihr Ohrstück kann mit einer Belüftung ausgestattet sein. Die Abbildungen unten zeigen die Reinigung der verschiedenen Belüftungstypen.



Das Ohrstück darf unter keinen Umständen mit Flüssigkeiten wie Wasser oder Reinigungslösungen in Berührung kommen.



Ziehen Sie beim Abnehmen des Hörsystems vom Ohr nicht am Schlauch.


Verwendung des Cerumenschutzes

Der Cerumenschutz hilft, das Hörsystem vor Ohrenschmalz (Cerumen) zu schützen. Stellen Sie sicher, dass immer der Widex Cerumenschutz an Ihrem Hörsystem angebracht ist.


Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Cerumenschutz durch Ohrenschmalz verstopft ist.



Das Maßrohrstück darf NICHT vom Schlauch getrennt werden.

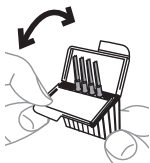


Öffnen Sie die Cerumenschutzpackung wie dargestellt.

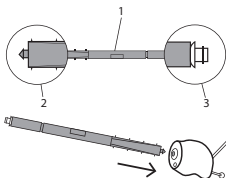


Das Cerumenschutz-Set besteht aus folgenden Teilen:

1. Haltestäbchen
2. Ziehaken
3. Cerumenschutz


Stecken Sie den Ziehaken des Haltestäbchens in den gebrauchten Cerumenschutz im Schallauslass ein.

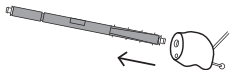

Ziehen Sie den gebrauchten Cerumenschutz gerade heraus.

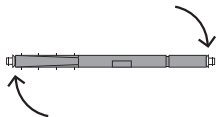

Drehen Sie das Haltestäbchen um.

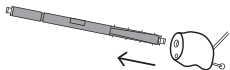

Setzen Sie den neuen Cerumenschutz in den Schallauslass ein. Ziehen Sie das Haltestäbchen gerade heraus. Der neue Cerumenschutz löst sich dabei automatisch vom Haltestäbchen. Drücken Sie den Cerumenschutz mit leichtem Druck gegen eine Oberfläche, um sicherzustellen, dass er sicher sitzt.





Der Cerumenschutz ist zur einmaligen Verwendung ausgelegt und wird nicht gereinigt.




Falls der Cerumenschutz nicht richtig sitzt, muss er entfernt und ein neuer eingesetzt werden.



Wenn der Cerumenschutz im Ohr herausfällt, wenden Sie sich an Ihren Arzt oder Hörgeräte-Akustiker, um ihn entfernen zu lassen. Versuchen Sie NICHT, den Cerumenschutz selbst zu entfernen.


STANDARD- UND MASSOHRSTÜCKE FÜR KLASSISCHEN DÜNNSCHLAUCH

Dieses Kapitel beschreibt die Handhabung und Reinigung verschiedener Ohrstücke für HdO-Modelle mit klassischem Dünnschlauch.

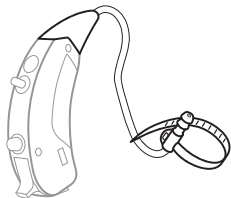


Reinigungswerkzeuge

Sie erhalten die folgenden Pflegewerkzeuge zusammen mit Ihrem Hörsystem:

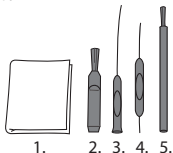

1. Tuch
2. Bürste
3. Langes Reinigungswerkzeug
4. Kurzes Reinigungswerkzeug
5. Magnetstab

Pflege

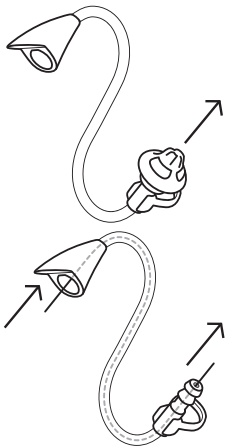

Ziehen Sie das Ohrstück vorsichtig vom Schlauch ab. Wenn Sie ein Maßrohrstück haben, muss dieses zur Reinigung des Schlauchs nicht abgezogen werden.


Reinigen Sie den Schlauch mit einem Reinigungsfaden. Führen Sie ihn durch den Schlauch. Ziehen Sie ihn am anderen Ende wieder heraus. Wenn Sie neue Reinigungsfäden benötigen, wenden Sie sich an Ihren Hörgeräte-Akustiker. Sie können das Standard-Ohrstück in lauwarmem Wasser reinigen: **Ziehen Sie es dazu zunächst vom Hörer ab** und spülen Sie es gründlich ab. Lassen Sie es dann über Nacht trocknen.



Verwenden Sie zur Reinigung auf keinen Fall Alkohol oder andere Arten von Reinigungsmitteln, da dies zu Verfärbungen führen kann.

Auswechseln des Ohrstücks

Montage eines Standard-Ohrstücks am Schallschlauch

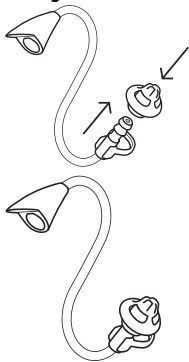


Drücken Sie den Schlauch vorsichtig bis ans Ende ins Ohrstück. Dabei ist es sehr wichtig, dass er sicher sitzt.

Montage eines Maßbohrstücks am Schallschlauch



Halten Sie das Maßbohrstück wie gezeigt und drücken Sie den Schlauch vorsichtig in das Ohrstück hinein. Schieben Sie den Schlauch mit dem Fingernagel so weit wie möglich hinein.

Wechsel des Dünnschlauchs

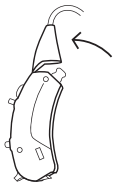

Heben Sie den Dünnschlauch wie gezeigt mit einer schrägen Bewegung nach hinten ab.





Klicken Sie den Dünnschlauch wie gezeigt oben auf das Hörsystem auf.

Verwendung des Ankerteils

Für den Doppeldome wird das integrierte Ankerteil nicht verwendet. Es sollte komplett abgeschnitten werden.

Bei einem Hörsystem mit Schirmchen oder Tulpe sollte das Ankerteil so zugeschnitten werden, dass es eine Schlaufe passender Größe bildet und den korrekten Sitz des Ohrstücks im Ohr sichert. Schneiden Sie das Ankerteil folgendermaßen zu:

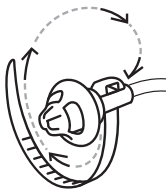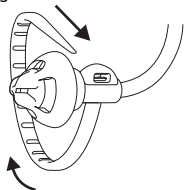


Beispiel 1

Führen Sie die Spitze des Ankerteils durch die kleine Öffnung seitlich am Schlauch.

Wenn die Schlaufe die richtige Größe hat, schneiden Sie überstehendes Material mit einer Schere o. Ä. ab.

Beispiel 2

Legen Sie das Ankerteil in eine Schlaufe wie durch die gestrichelte Linie und die Pfeile dargestellt.

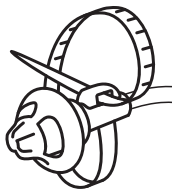

Führen Sie die Spitze des Ankerteils wie gezeigt durch die kleine Öffnung an der Seite des Schallschlauchs, so dass die Schlaufe geschlossen wird.



Wenn die Schlaufe die richtige Größe hat, drehen Sie das Ohrstück herum und schneiden Sie überstehendes Material mit einer Schere o. Ä. ab.

Die Schlaufe hat die richtige Größe, wenn sie die Position des Hörsystems im Ohr sichert und das Ohrstück sicher in und am Ohr sitzt.

HINWEIS

Achten Sie darauf, dass das Ende der Ankerschleufe bündig mit der kleinen Öffnung abschließt und keine scharfen Kanten hat, die Reizungen am Ohr verursachen können. Prüfen Sie dies mit der Fingerspitze.

HINWEIS


Für Maßbohrstücke wird das integrierte Ankerteil NICHT verwendet, sondern sollte komplett abgeschnitten werden.

KLASSISCHE OTOPLASTIKEN

Dieses Kapitel beschreibt die Handhabung und Reinigung verschiedener klassischer Otoplastiken für HdO-Modelle.

Reinigungswerkzeuge

Sie erhalten die folgenden Pflegewerkzeuge zusammen mit Ihrem Hörsystem:

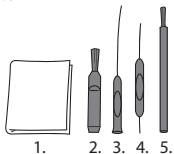


1. Tuch
2. Bürste
3. Langes Reinigungswerkzeug
4. Kurzes Reinigungswerkzeug
5. Magnetstab

Pflege



Überprüfen Sie regelmäßig, dass das Ohrstück sauber und frei von Cerumen (Ohrenschmalz) und Feuchtigkeit ist. Reinigen Sie das Ohrstück nach jedem Tragen mit einem Tuch.

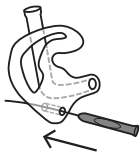


Eine evtl. vorhandene Belüftung reinigen Sie mit dem Reinigungswerkzeug.



Ziehen Sie den Schlauch mit der Otoplastik regelmäßig vom Hörwinkel des Hörsystems ab.



Reinigen Sie den Schlauch und die Otoplastik gründlich in lauwarmem Wasser. Lassen Sie sie dann über Nacht trocknen.

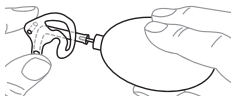

Falls noch Flüssigkeit in der Otoplastik oder dem Schlauch vorhanden ist, können Sie z. B. einen Blasebalg zum Trocknen verwenden, bevor Sie den Schlauch wieder mit dem Hörwinkel verbinden.



Verwenden Sie zur Reinigung auf keinen Fall Alkohol oder andere Arten von Reinigungsmitteln, da dies zu Verfärbungen führen kann.

Schallschlauch wechseln

Sollte der Schlauch defekt werden, muss er gewechselt werden.

Wenn Sie neue Schallschläuche benötigen oder das Ohrstück nicht länger richtig passt, wenden Sie sich an Ihren Hörgeräte-Akustiker.

SYMBOLLE

Von WSAUD A/S für die Kennzeichnung medizinischer Geräte (auf Etiketten, in Bedienungsanleitungen usw.) verwendete Symbole:

Symbol	Bezeichnung/Beschreibung
	Hersteller Der Name und die Adresse des Herstellers des Produktes stehen neben dem Symbol. Falls erforderlich kann auch das Herstellungsdatum angegeben sein.
	Bestellnummer Die Bestellnummer (Artikelnummer) des Produktes.
	Bedienungsanleitung beachten Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Warnhinweise und Informationen zu Vorsichtsmaßnahmen und muss vor Gebrauch des Produktes gelesen werden.
	Warnung Hinweise mit diesem Symbol müssen vor Gebrauch des Produktes gelesen werden.
	EEAG-Kennzeichnung „Nicht im Hausmüll entsorgen.“ Wenn ein Produkt entsorgt werden soll, muss es zu einer ausgewiesenen Sammel- und Recyclingstelle gebracht werden, damit Umwelt und Gesundheit nicht durch gefährliche Stoffe gefährdet werden.

**Hersteller**

Der Name und die Adresse des Herstellers des Produktes stehen neben dem Symbol. Falls erforderlich kann auch das Herstellungsdatum angegeben sein.

**Bestellnummer**

Die Bestellnummer (Artikelnummer) des Produktes.

**Bedienungsanleitung beachten**

Die Bedienungsanleitung enthält wichtige Warnhinweise und Informationen zu Vorsichtsmaßnahmen und muss vor Gebrauch des Produktes gelesen werden.

**Warnung**

Hinweise mit diesem Symbol müssen vor Gebrauch des Produktes gelesen werden.

**EEAG-Kennzeichnung**

„Nicht im Hausmüll entsorgen.“ Wenn ein Produkt entsorgt werden soll, muss es zu einer ausgewiesenen Sammel- und Recyclingstelle gebracht werden, damit Umwelt und Gesundheit nicht durch gefährliche Stoffe gefährdet werden.

Symbol	Bezeichnung/Beschreibung
---------------	---------------------------------



CE-Kennzeichnung

Das Produkt entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien zur CE-Kennzeichnung.



RCM-Zeichen

Das Produkt entspricht hinsichtlich der elektromagnetischen Verträglichkeit und des Funkfrequenzspektrums den regulatorischen Anforderungen an Produkte, die für den australischen und neuseeländischen Markt bestimmt sind.
--



WSAUD A/S

Nymøllevej 6, DK-3540 Lyngby, Danmark
<https://global.widex.com>

Anleitung Nr.:
9 514 0561 002 02
Stand:
2022-04

